



# Gamma Care

Für die moderne Wundbehandlung

- ohne Schmerzen
- ohne Nebenwirkungen
- reines Naturprodukt
- reduziert Entzündungsprozesse
- reduziert das Reinfektionsrisiko
- unterstützt die Wundheilung



## ActiMaris®

+ Natural Health Care



### SIMPLE MEDICAL SOLUTION DESIGNED BY NATURE



100% natural



O<sub>2</sub> / ROS



Sea-salt



Basic pH

Alle Inhaltsstoffe auf natürlicher und bio-physikalischer Basis.

## Ionisiertes Meerwasser & Reaktive Sauerstoff-Spezies (ROS)

# Übersicht der ActiMaris®-Produkte



pH-Wert 9.5, NaOCl 0.2%, Meersalz 3.0%

## Zus./Comp.:

Aqua purificata, sal maris, sodium oxychlorite

Inhalt	Art. Nr.
50 ml	30355
300 ml	30350
1'000 ml	31050

## ActiMaris® FORTE – Wundspüllösung für Haut, Schleimhaut und Wunden

- Wirksam gegen Bakterien und bakterielle Sporen
- Wirksam gegen Viren (SARS-CoV-Gruppe, Atemwegsviren) und Pilze
- Postoperative Wunden und Prophylaxe von SSI
- Ganzkörper-Dekolonisierung bei positivem MRE-Befund
- Akute und chronische Wunden
- Verbrennungen 1. bis 3. Grades
- Übelriechende und infizierte Wunden
- Entzündliche Prozesse der Haut und Schleimhaut
- Auch für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet

**Einwirkzeit:** 5-10 Minuten

**Häufigkeit:** Kann mehrmals täglich angewendet werden.  
Die Anwendung ist in der Zeit und Häufigkeit nicht begrenzt.

**Dauer:** Bis eine Wunde zu heilen beginnt oder geheilt ist.

**Wichtig:** Die Dauer und Frequenz der Anwendung ist an die individuellen Wundverhältnisse anzupassen.



pH-Wert 8.5, NaOCl 0.04%, HOCl 0.004%, Meersalz 1.2%

## Zus./Comp.:

Aqua purificata, sal maris, sodium oxychlorite

Inhalt	Art. Nr.
50 ml	30305
300 ml	30300
1'000 ml	31000

## ActiMaris® SENSITIVE – Wundspüllösung für Haut, Schleimhaut und Wunden

- Wirksam gegen Bakterien und bakterielle Sporen
- Wirksam gegen Viren (SARS-CoV-Gruppe, Atemwegsviren) und Pilze
- Postoperative Wunden und Prophylaxe von SSI
- Ganzkörper-Dekolonisierung bei positivem MRE-Befund
- Akute und chronische Wunden
- Verbrennungen 1. bis 3. Grades
- Übelriechende und infizierte Wunden
- Entzündliche Prozesse der Haut und Schleimhaut
- Auch für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet

**Einwirkzeit:** 15-20 Minuten

**Häufigkeit:** Kann mehrmals täglich angewendet werden.  
Die Anwendung ist in der Zeit und Häufigkeit nicht begrenzt.

**Dauer:** Bis eine Wunde zu heilen beginnt oder geheilt ist.

**Wichtig:** Die Dauer und Frequenz der Anwendung ist an die individuellen Wundverhältnisse anzupassen.



pH-Wert 9.5, NaOCl 0.2%, Meersalz 3.0%, Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat

## Zus./Comp.:

Aqua purificata, lithium-magnesium-sodium-silicate, sal maris, sodium oxychlorite

Inhalt	Art. Nr.
20 g	30220
50 g	30250

## ActiMaris® Wundgel für Haut, Schleimhaut und Wunden

- Wirksam gegen Bakterien und bakterielle Sporen
- Wirksam gegen Viren (SARS-CoV-Gruppe, Atemwegsviren) und Pilze
- Postoperative Wunden und Prophylaxe von SSI
- Lokale Dekolonisierung bei positivem MRE-Befund
- Akute und chronische Wunden
- Verbrennungen 1. bis 3. Grades
- Übelriechende und infizierte Wunden
- Entzündliche Prozesse der Haut und Schleimhaut
- Auch für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet

**Häufigkeit:** Kann mehrmals täglich angewendet werden.  
Die Anwendung ist in der Zeit und Häufigkeit nicht begrenzt.

**Dauer:** Bis eine Wunde zu heilen beginnt oder geheilt ist.

**Wichtig:** Die Dauer und Frequenz der Anwendung ist an die individuellen Wundverhältnisse anzupassen und sollte so lange durchgeführt werden, bis sich alle Beläge und Nekrosen leicht entfernen lassen und die Wunde optisch sauber ist.



pH-Wert 8.5, NaOCl 0.04%, HOCl 0.004%,  
Meersalz 1.2%

**Zus./Comp.:**

Aqua purificata, sal maris, sodium oxychlorite

Inhalt	Art. Nr.
20 ml	33020

## ActiMaris® NASAL Spray

### Effektives Taschensprühsystem

- ✓ Wirksam bei der MRE-Dekolonisierung
- ✓ Wirkt abschwellend, lindernd und antimikrobiell
- ✓ Bei Schnupfen und Erkältungen
- ✓ Bei Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen
- ✓ Reinigt und befeuchtet die Schleimhaut

**Häufigkeit:** *Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren:*

4-5 Mal täglich mit je 2 Sprühstößen in jedes Nasenloch.

*Kleinkinder unter 2 Jahren:*

2-3 Mal täglich mit je 1-2 Sprühstößen in jedes Nasenloch.

**Wichtig:**

Eine Überdosierung ist nicht möglich, auch keine systemische Wirkung.  
Kann bei Bedarf über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



pH-Wert 9.5, NaOCl 0.2%, Meersalz 3.0%

**Zus./Comp.:**

Aqua purificata, sal maris, sodium oxychlorite

Inhalt	Art. Nr.
50 ml	33150

## ActiMaris® OROPHARYNX Spray

### Schnelle Wirksamkeit

- ✓ Wirksam bei der MRE-Dekolonisierung
- ✓ Wirkt abschwellend, schmerzlindernd und antimikrobiell
- ✓ Bei Zahnfleischentzündungen und Schleimhautentzündungen
- ✓ Bei Schluckbeschwerden und Schmerzen im Rachenraum
- ✓ Reinigt und befeuchtet die Schleimhaut

**Häufigkeit:** *Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren*

4-5 Mal täglich mit je 1-2 Sprühstößen in den weit geöffneten Mund.

*Kleinkinder unter 2 Jahren*

2-3 Mal täglich mit je 1-2 Sprühstößen in den weit geöffneten Mund.

**Wichtig:**

Eine Überdosierung ist nicht möglich, auch keine systemische Wirkung.  
Kann bei Bedarf über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

**Auf der Grundlage von mehr als 1,2 Millionen Anwendungen mit ActiMaris®-Produkten, sind bisher keine Nebenwirkungen aufgetreten und es wurden keine Kontraindikationen festgestellt.**

✓ 100% NATÜRLICH

✓ OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL

✓ OHNE PARFÜM



✗ KEIN KORTISON


✗ KEIN XYLOMETAZOLIN

✗ KEIN ALKOHOL

✗ KEIN ANTIBIOTIKUM

# Produktprofil – ActiMaris®

Bei den ActiMaris® Produkten lassen sich die Reinigungskraft sowie Abschwellung des Gewebes und Keimminderung nicht nur auf einzelne Inhaltsstoffe zurückführen, sondern auf das Zusammenspiel des gesamten Inhalts. Das ionisierte Meerwasser, die reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und der hohe pH-Wert tragen zur physikalischen Reinigungs- und Dekolonisierungswirkung bei.

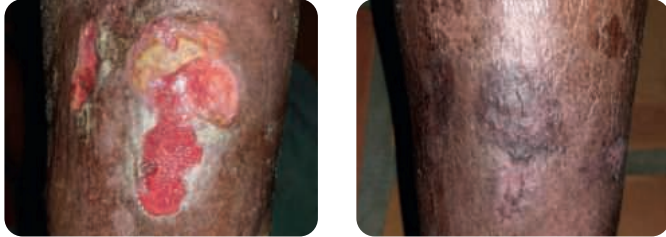

## Ulcus Cruris Venosum


Nach 4-wöchiger lokaler Behandlung mit ActiMaris® SENSITIV Wundspüllösung und ActiMaris® Wundgel komplette Wundheilung und Epithelisierung der Haut.

- Entzündungen und Infektionen der Haut und Schleimhaut
- Akute mechanische Wunden
- Nicht heilende chronische Wunden aller Ätiologien
- Thermische und chemische Wunden (Verbrennungen 1. bis 3. Grades)
- Eintrittsportale von urologischen Kathetern und PEG-Schläuchen sowie Drainagen / Stomata
- Instillation im Rahmen der NPWT
- SSI-Prophylaxe, Reinigung des Operationsfeldes
- Peritonealspülung
- Prophylaxe und Therapie von MRE (MRSA / VRE / MRGN3 / MRGN4), Viren und Pilzen
- Schleimhaut des oberen und unteren Respirationstraktes ("united airways" and "one way, one disease")


- Kann überall in allen Körperregionen angewendet werden, auch in Körperhöhlen
- Dauer der Therapie: so lange wie nötig
- Keine bekannten Kontraindikationen oder Nebenwirkungen
- Anwendbar von der Wiege bis zur Bahre

Hervorragendes «Efficacy-Safety-Effectiveness» Potenzial des ActiMaris®-Komplexes, der evidenzbasiert ist, ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist und eine «Unique Value Proposition (UVP)» besitzt.

## Vielfältige Struktur mit Multi-Targeting-Effekt

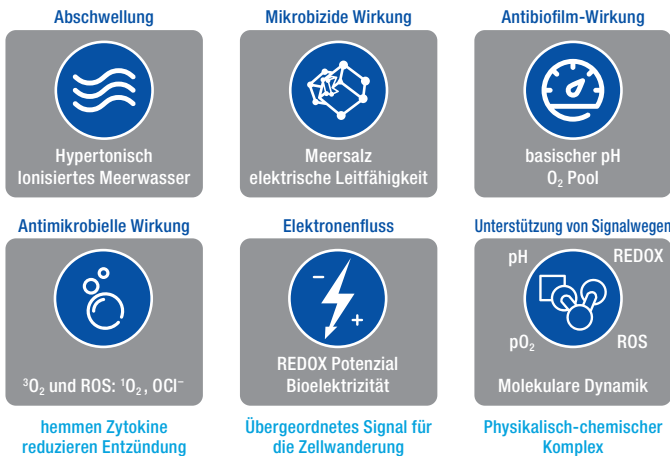

## Die Multifunktionalität des ActiMaris®-Sauerstoff-ROS-Redox-Komplexes

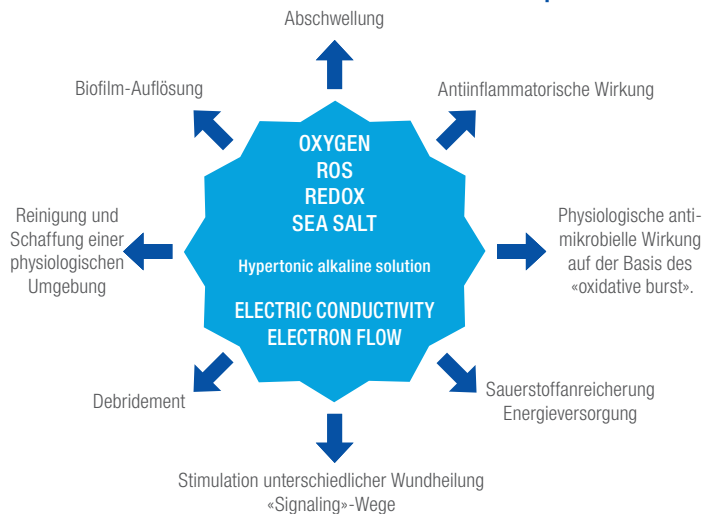

02-2024 - V1.0

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.  
[www.ActiMaris.com](http://www.ActiMaris.com)

## Entwicklung und Produktion:

ActiMaris AG



natural medical solutions

ActiMaris AG  
 Sandgrube 29  
 9050 Appenzell  
 SCHWEIZ

Fon: +41 71 505 75 25  
 Fax: +41 71 505 75 24  
[www.actimaris.com](http://www.actimaris.com)  
[info@actimaris.com](mailto:info@actimaris.com)

## Vertriebspartner Schweiz:



GANZHEITLICHE  
 LÖSUNGEN FÜR  
 PFLEGEORGANISATIONEN

- ✓ Beratung
- ✓ Coaching
- ✓ Erstklassige Produkte

Gamma Care GmbH  
 Hänkelbodenstrasse 3  
 8173 Neerach  
 SCHWEIZ

+41 41 544 52 15  
[info@gammacare.ch](mailto:info@gammacare.ch)  
[www.gammacare.ch](http://www.gammacare.ch)