



Gamma Care

2% CHLORHEXIDIN

DIE ANTISEPTISCHE GANZKÖRPER-WASCHUNG

PRODUKTVORTEILE



Mit 2% Chlorhexidin für eine starke antibakterielle Wirkung



Geeignet für vorstationäre Patienten und ITU-Bäder



Kann für die Ganzkörperreinigung verwendet werden



Dermatologisch getestet



Dick und stark - sanft im Griff, aber robust genug für alle Reinigungsanforderungen



Nicht gentechnisch verändert und nicht an Tieren getestet



Keine Parabene oder Alkohol



Kann in der Mikrowelle aufgewärmt werden



GEBRAUCHSANWEISUNG

Eine Packung ist für den Gebrauch für einen Patienten bestimmt und ermöglicht die Reinigung und Desinfektion des gesamten Körpers. Wenn der Patient nicht in der Lage ist, das Produkt selbst zu benutzen, sollte das Pflegepersonal helfen. Die Handschuhe können erwärmt oder direkt aus der Packung verwendet werden. Lassen Sie Ihre Haut nach der Reinigung an der Luft trocknen, spülen Sie sie nicht ab.

Vorsicht! Nur zur äusserlichen Anwendung bestimmt und nicht zur Anwendung auf Schleimhäuten empfohlen (Kontakt mit Augen, Ohren, Nase und Mund vermeiden). Nicht auf offenen Hautwunden oder empfindlicher Haut anwenden. Bei Hautreizungen nicht weiter verwenden. Nicht wiederverwenden.



GAMMA CARE 2% Chlorhexidin Waschhandschuhe

Artikelnummer: GC109 / 8 Waschhandschuhe/Packung | 30 Packungen/Karton

TESTDATEN

Unsere biozide Formulierung hat sich als wirksam gegen die folgenden Mikroorganismen erwiesen:¹

STRAIN TESTED	TEST	CONTACT TIME
Escherichia coli	EN13727	5 min
Pseudomonas aeruginosa	EN13727	1 min
Staphylococcus aureus	EN13727	1 min
Enterococcus hirae	EN13727	5 min
Enterococcus faecalis	EN13727	1 min
Acinetobacter baumannii	EN13727	1 min
MRSA	EN13727	5 min
Serratia marcescens	EN13727	1 min
Candida albicans	EN13624	1 min

GammaCare Chlorhexidin-Waschhandschuhe haben den VAH-13-Praxistest bestanden; die Produkte haben ihre Wirksamkeit auf der menschlichen Haut bei den Standardtestzeiten von 15 Sekunden und 30 Minuten nachgewiesen. Die Testnorm verlangt, dass das Produkt an Hautstellen mit einer hohen und einer niedrigen Dichte an Talgdrüsen getestet wird.¹

INHALTSSTOFFE

Aqua, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate*, PEG-6 Caprylic/Capric Glyceride, Didecylidimonium Chloride*, Bis-PEG/PPG-20/20 Dimethicone, Acetic Acid.

*Aktive Substanzen:

Chlorhexidine Digluconate 20g/kg (CAS n°18472-51-0), Didecylidimonium Chloride 2g/kg (CAS n° 7173-51-5).

Hinweis: Biozidprodukte mit Vorsicht verwenden. Lesen Sie vor der Verwendung stets das Etikett und die Produktinformation.

Referenzen:

1. Independent laboratory, data on file.

2. 1. Johnson A, Kapadia B, Daley J, Molina C, Mont M. Chlorhexidine reduces infection in knee arthroplasty. J Knee Surg. 2013; 26(03): 213-218.

72%

Eine Studie zeigte, dass die Anwendung von 2%igen Chlorhexidin-Waschhandschuhen in der Nacht vor der Operation die SSI um 72% reduzierte.²



Gamma Care GmbH
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf

www.gammacare.ch
info@gammacare.ch
+41 52 503 01 00